



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA

Extensión: 1325 y 1693

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
PRUEBAS DE RUTINA Y URGENCIAS										
500008	Ácido úrico	4	URIC	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500006	Ácido Valproico	63	AVAL	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO tomar muestra por goteo ni en tubos que contengan gel.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500018	Amilasa	21	AMY	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500019	Amonio	23	AMONIO	Plasma	Verde	Microtomador	Transportar en hielo, la muestra no debe estar coagulada.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500338	Bilirrubina TOTAL	14	BILIS	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	Proteger de la luz. NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500339	Bilirrubina INDIRECTA									
500134	BUN (Nitrógeno ureico)	25	BUN	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500098	Calcio	44	CA	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500100	Carbamazepina	64	CARBA	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO tomar muestra por goteo ni en tubos que contengan gel.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500336	Cloro	8	CL	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500133	Creatinina	27	CRE	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500140	Digoxina	69	DIGO	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO tomar muestra por goteo ni en tubos que contengan gel.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500139	Fenitoína (DFH)	66	DFH	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO tomar muestra por goteo ni en tubos que contengan gel.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA

* De lunes a viernes de las 14:00 a las 7:00 en el Laboratorio directamente. Los estudios de urgencias tienen un tiempo de entrega máximo de 1 hora. Para estudios de urgencia la muestra puede tomarse 1 microtomador lleno, muestras de urgencia mas pruebas de rutina puede tomarse en 2 microtomadores llenos

ELABORÓ

BIOL. MA. DEL PILAR PÉREZ
MARTÍNEZ

REVISÓ

EBC. VIRGINIA MARTÍNEZ
BEZIES

AUTORIZÓ

EBC. LINA T. ROMERO
GUZMÁN



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA

Extensión: 1325 y 1693

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
500151	Fenobarbital	65	FENO	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO tomar muestra por goteo ni en tubos que contengan gel.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500165	Glucosa	28	GLU	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500194	Lipasa	165	LIP	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
PRUEBAS DE RUTINA Y URGENCIAS										
500334	Potasio	7	K	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO presionar sobre el sitio de punción.	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
S/N	Proteínas por Índice de Refracción	995	PIR	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500335	Sodio	6	NA	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500232	Teofilina	68	TEO	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tener GEL los tubos	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500163	Gasometría (PH,PCO ₂ ,HCO ₃ ,PO ₂)	85	GAS	Sangre total	Jeringa	Mínimo 300 microlitros	Transportarse en agua de hielo. No debe tener coágulos	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500005	Lactato	99	LACT	Sangre total	Jeringa	300 microlitros	Transportarse en agua de hielo. No debe tener coágulos	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500110	Citoquímico Muestra Diversa	96	CQ_MCD	SecreciónLiq. Diálisis, etc.	Vial estéril	Mínimo 1 mL	Especificar si es LCR, secreción, líq. de diálisis, etc. Debe enviarse lo más pronto posible para su análisis	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500110	Citoquímico de Líquido Cefalorraquídeo	164	LCR_CQ	LCR	Vial estéril	Mínimo 1 mL	Especificar si es LCR, secreción, líq. de diálisis, etc. Debe enviarse lo más pronto posible para su análisis	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500111	Coagulación de LCR (solo en turno nocturno)	178	LCR_COAU	LCR	Vial estéril	Mínimo 1 mL	Especificar si es LCR, secreción, líq. de diálisis, etc. Debe enviarse lo más pronto posible para su análisis	Lun a Sab	22:00 - 06:00 *	MISMO DIA

* De lunes a viernes de las 14:00 a las 7:00 en el Laboratorio directamente. Los estudios de urgencias tienen un tiempo de entrega máximo de 1 hora. Para estudios de urgencia la muestra puede tomarse 1 microtomador lleno, muestras de urgencia mas pruebas de rutina puede tomarse en 2 microtomadores llenos



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA

Extensión: 1325 y 1693

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
500160	Tinción de Gram-LCR (solo en turno nocturno)	975	GRAM	LCR	Vial estéril	Mínimo 1 mL	Especificar si es LCR, secreción, líq. de diálisis, etc. Debe enviarse lo más pronto posible para su análisis	Lun a Sab	22:00 - 06:00 *	MISMO DIA
QUIMICA URINARIA DE URGENCIAS										
500149	Examen General de Orina (EGO)	89	EGO	Orina	Frascos o bolsa recolectora	Mínimo 10 mL	INDISPENSABLE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN O DE MICCION. NO recolectar muestra en periodo de menstruación	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500336	Cloro en orina	322	CLO	Orina	Frascos o bolsa recolectora	Mínimo 3 mL	INDISPENSABLE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN O DE MICCION	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500133	Creatinina en orina	304	CREO	Orina	Frascos o bolsa recolectora	Mínimo 3 mL	INDISPENSABLE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN O DE MICCION	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500335	Potasio en orina	325	KO	Orina	Frascos o bolsa recolectora	Mínimo 3 mL	INDISPENSABLE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN O DE MICCION	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA
500334	Sodio en orina	307	NAO	Orina	Frascos o bolsa recolectora	Mínimo 3 mL	INDISPENSABLE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN O DE MICCION	Lun a Dom	7:00 - 14:00 *	MISMO DIA

* De lunes a viernes de las 14:00 a las 7:00 en el Laboratorio directamente. Los estudios de urgencias tienen un tiempo de entrega máximo de 1 hora. Para estudios de urgencia la muestra puede tomarse 1 microtomador lleno, muestras de urgencia mas pruebas de rutina puede tomarse en 2 microtomadores llenos



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA

Extensión: 1325 y 1693

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
PRUEBAS DE RUTINA										
500243	Alanina Aminotransferasa (ALT)	18	ALT	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500253	Albúmina	46	ALBU	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500244	Aspartato Aminotransferasa (AST)	17	AST	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500257	CO2 Total	12	CO2	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	Tomar muestra en condiciones anaerobias	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500099	Capacidad de Fijación de Hierro	107	FIJACION	Suero	Rojo	3 mL exactos	Debe enviar tubo y solicitud por separado	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MIERCOLES Y VIERNES
500113	Colesterol Total	5	COL	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500122	Creatincinasa	20	CK	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500136	Deshidrogenasa láctica	16	DHL	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500156	Fosfatasa Alcalina	15	FA	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500157	Fósforo	10	P	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500162	Gamma Glutamil Transferasa (GGT)	19	GGT	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500328	HDL Colesterol	13	HDLCOL	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500197	Magnesio	11	MG	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500402	Prealbumina	34	PREALBU	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500216	Proteínas totales	45	PT	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500181	Hierro sérico	106	FES	Suero	Rojo	3 mL exactos	Debe enviar tubo y solicitud por separado	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500176	Hemoglobina glucosilada	72	HBGLU	Sangre Total	Lila	3 mL ó microtomador	Debe enviar tubo y solicitud por separado	Lun a Vier	7:00 - 9:30	Lun y Juev



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA

Extensión: 1325 y 1693

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
PRUEBAS DE RUTINA										
500401	Trasferrina	35	TRANSFE	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500245	Triglicéridos	22	TG	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	7:00 - 9:30	MISMO DIA
500165	Glucosa (menos 15 min)	152	GLU_<15	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (Basal)	150	GLUBA	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (0 min)	151	GLU_CERO	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (más 15 min)	153	GLU_15	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (30 min)	154	GLU_30	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (45 min)	155	GLU_45	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (60 min)	156	GLU_60	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (90 min)	157	GLU_90	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (120 min)	158	GLU_120	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (Preprandial)	159	GLU_PRE	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	Glucosa (posprandial)	160	GLU_POST	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA
500165	GLUCOSA de 5 min	161	GLU_5	Suero	Rojo	3 mL ó microtomador	NO se debe de tomar la muestra por goteo	Lun a Vier	Según recolección	MISMO DIA